

PAKIET RELAKSACYJNY

2025.1

Wymagania sprzętowe	3
Co jest potrzebne?	3
Baza zadań terapeutycznych	5
Ruchy funkcjonalne	5

CO JEST POTRZEBNE?

Upewnij się, że komputer, na którym ma być aktywny ten moduł, ma zainstalowany Panel Pacjenta VAST.Rehab i że spełnione są następujące wymagania sprzętowe:

- Meta Quest 3
- Meta Quest 3s




RUCHY FUNKCJONALNE


STWORZENIA MORSKIE

Mierz i trenuj umiejętności wykonywania ruchów w oparciu o rzeczywistą biomechanikę sytuacyjną.

TRYBY STEROWANIA

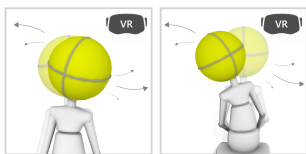

WYNIKI

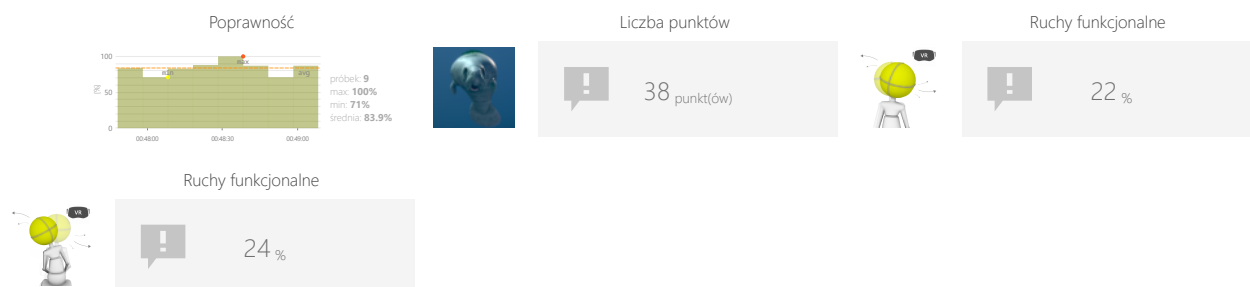

MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA

- Czas trwania zadania

CELE



- Spostrzegawczość
- Relaks
- Wizualna koordynacja ruchowa
- Orientacja przestrzenna

INSTRUKCJA DLA PACJENTA


Zanurz się w morskich głębinach, żeby pływać w otoczeniu przyjaznych, morskich stworzeń. Rób zdjęcia, aby wywołać ich reakcję i sprawić, że podpłyną bliżej. Celuj dokładnie, aby zdobyć wyższy wynik! Używając kontrolerów: użyj przycisku pod palcem wskazującym lub przycisku A/X. Używając dłoni: zegnij palec wskazujący albo zetknij kciuk z palcem wskazującym lub środkowym, aby zrobić zdjęcie.



PRZYKŁADOWE USTAWIENIA

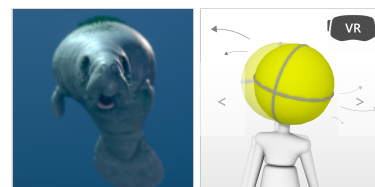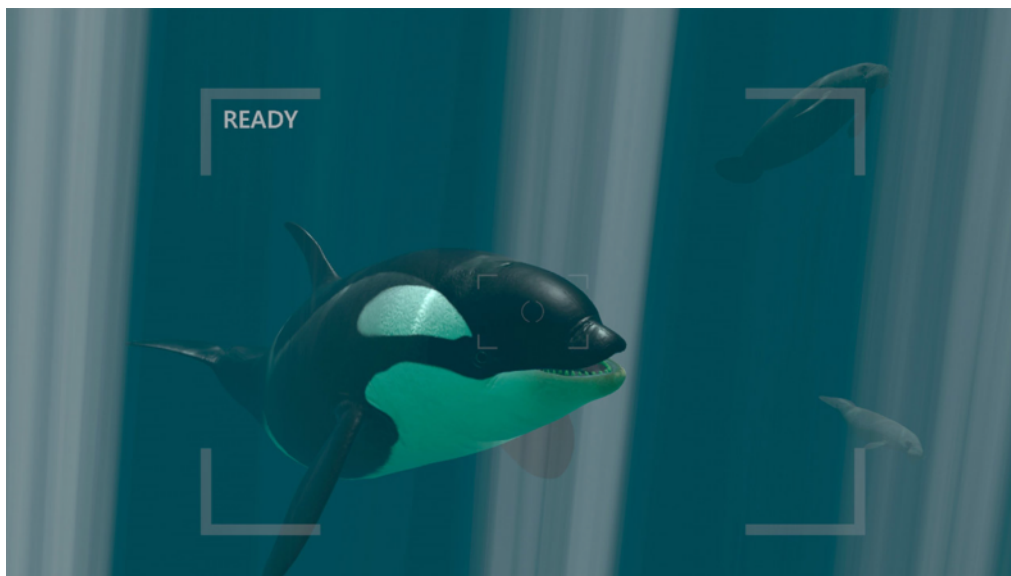

Czas trwania
< 90s >

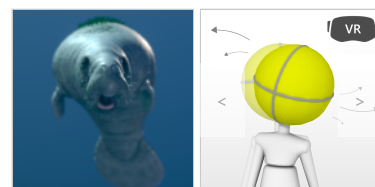

Czas trwania
< 90s >




RUCHY FUNKCJONALNE


ARCHEOLOG

Mierz i trenuj umiejętności wykonywania ruchów w oparciu o rzeczywistą biomechanikę sytuacyjną.

TRYBY STEROWANIA

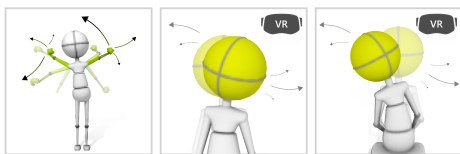

WYNIKI

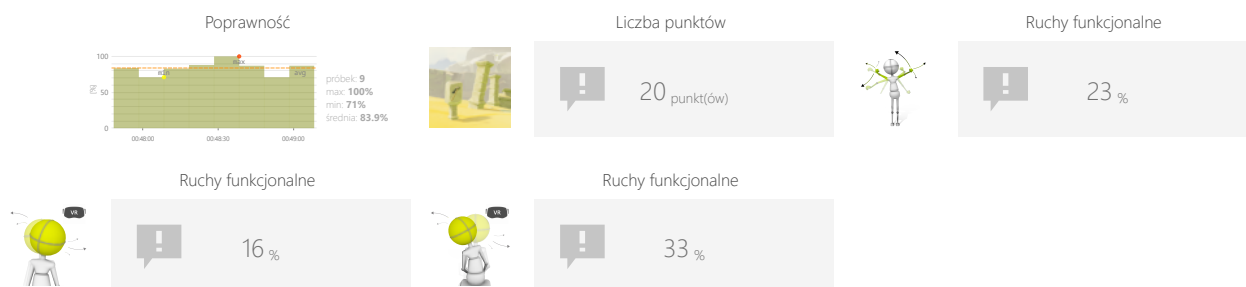

MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA

- Czas trwania zadania
- Twardość kamienia
- Ręka

CELE

- Skupienie
- Powtarzające się ruchy
- Relaks
- Chwytywanie oburącz

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

Umieść dłuto na kamieniu i uderz młotkiem. Tym działaniem rozłamiesz kamień, ukazując cenne znalezisko ukryte w jego wnętrzu.



PRZYKŁADOWE USTAWIENIA






RUCHY FUNKCJONALNE

SADZENIE DRZEW

Mierz i trenuj umiejętności wykonywania ruchów w oparciu o rzeczywistą biomechanikę sytuacyjną.

TRYBY STEROWANIA

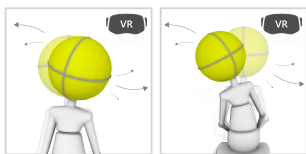

WYNIKI



MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA

- Czas trwania zadania
- Ręka

CELE

- Przewidywanie trajektorii obiektów w przestrzeni 3D
- Precyzja ruchu
- Skupienie
- Relaks
- Chwytywanie oburącz

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

Użyj procy, aby celować nasionami w miejsca oznaczone przez latające obiekty. Wybierz kolor drzewa za pomocą joysticka na kontrolerze.