

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA LOKALNEGO SERWERA

Wersja oprogramowania: 2020.1

Wprowadzenie	3
Do czego służy aplikacja Local Server Manager?	3
Jak zainstalować aplikację Local Server Manager (z serwerem lokalnym)?	4
Scenariusze	5
Upewnij się, że serwer lokalny działa poprawnie	5
Aktywuj automatyczne kopie zapasowe	6
Wybierz ręcznie miejsce przechowywania pliku lokalnej bazy danych	7
Utwórz ręczną kopię zapasową	8
Przywróć bazę danych z kopii zapasowej	9
Odśwież licencje dostępne na serwerze lokalnym	10
Rozwiązywanie problemów	11
Co zrobić, gdy pojawi się problem?	11

DO CZEGO SŁUŻY APLIKACJA LOCAL SERVER MANAGER?

WPROWADZENIE

VAST.Rehab Local Server Manager służy do monitorowania lokalnego serwera VAST.Rehab i zarządzania nim. Serwer lokalny jest odpowiedzialny za udostępnianie współdzielonej bazy danych dla wszystkich stacji pacjentów VAST.Rehab i stacji terapeutów, jeśli połączenie internetowe nie jest używane.

JAK ZAINSTALOWAĆ APLIKACJĘ LOCAL SERVER MANAGER (Z SERWEREM LOKALNYM)?

WPROWADZENIE

Wszystkie aplikacje VAST.Rehab mają standardowe instalatory, które przeprowadzą Cię przez cały proces. Możesz pobrać najnowszą wersję z:

- <http://download.brontesprocessing.com/files/vast.rehab/LocalServer>


NAZWA KOMPUTERA ZOSTAJE ZMIENIONA NA VR-SERVER

Wszystkie panele VAST.Rehab domyślnie wyszukują serwer lokalny, używając jego nazwy VR-SERVER. Pozwala to na komunikację z serwerem lokalnym bez skomplikowanej konfiguracji. Instalator automatycznie zmieni nazwę twojego komputera w razie potrzeby.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE SERWER LOKALNY DZIAŁA POPRAWNIE

SCENARIUSZE

Uruchom narzędzie VAST.Rehab Local Server Manager, używając jego ikony na pulpicie. Wszystkie usługi powinny działać tak, jak widać na poniższym ekranie.

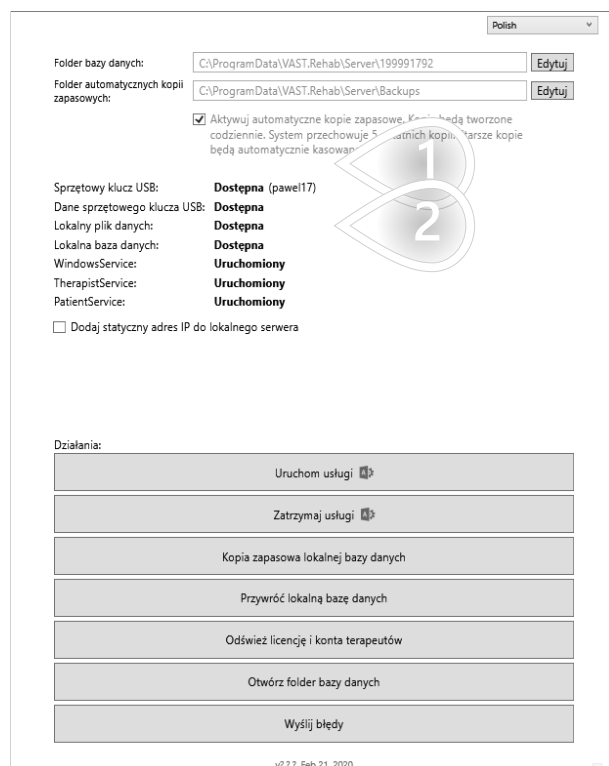


- 1 Twój login administratora VAST.Rehab powinien być wyświetlony tutaj
- 2 Wszystkie elementy powinny być dostępne, a usługi powinny działać

AKTYWUJ AUTOMATYCZNE KOPIE ZAPASOWE

SCENARIUSZE

Możesz skonfigurować serwer lokalny do automatycznego tworzenia kopii zapasowych bazy danych. Jeśli chcesz aktywować tę funkcję, postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Zaleca się przechowywanie kopii zapasowych na innym dysku niż główna baza danych.

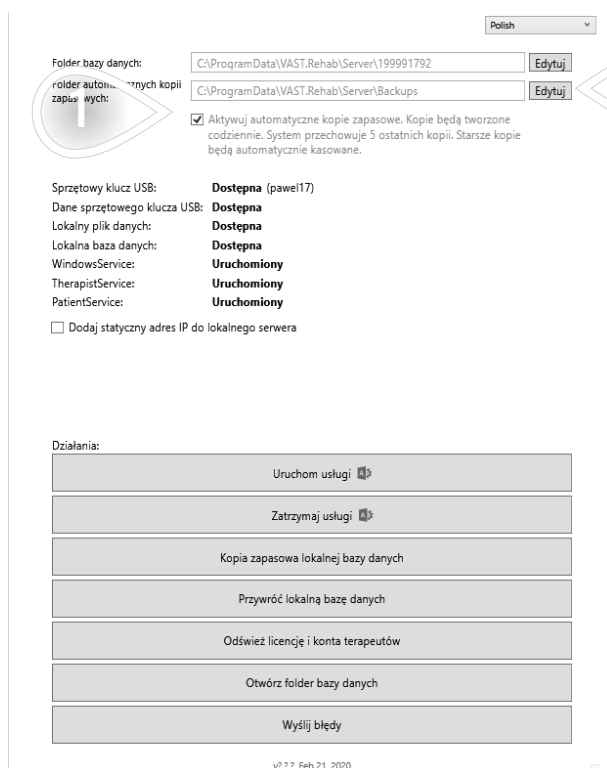

Polish

Folder bazy danych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\199991792 Edytuj

Folder automatycznych kopii zapasowych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups Edytuj

☒ Aktywuj automatyczne kopie zapasowe. Kopie będą tworzone codziennie. System przechowuje 5 ostatnich kopii. Starsze kopie będą automatycznie kasowane.

Sprzętowy klucz USB: Dostępna (pawel17)

Dane sprzętowego klucza USB: Dostępna

Lokalny plik danych: Dostępna

Lokalna baza danych: Dostępna

WindowsService: Uruchomiony

TherapistService: Uruchomiony

PatientService: Uruchomiony

☐ Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera

Działania:

- Uruchom usługi
- Zatrzymaj usługi
- Kopia zapasowa lokalnej bazy danych
- Przywróć lokalną bazę danych
- Odśwież licencje i konta terapeutów
- Otwórz folder bazy danych
- Wyślij błędy


v2.2.2, Feb 21, 2020

- 1 Włącz tę opcję
- 2 Wybierz dysk i folder, w którym chcesz zapisywać automatyczne kopie zapasowe

WYBIERZ RĘCZNIE MIEJSCE PRZECHOWYWANIA PLIKU LOKALNEJ BAZY DANYCH

SCENARIUSZE

Nie zaleca się trzymania bazy danych VAST.Rehab i systemu operacyjnego na tej samej partycji dysku. Lokalizację można ustawić ręcznie, postępując zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

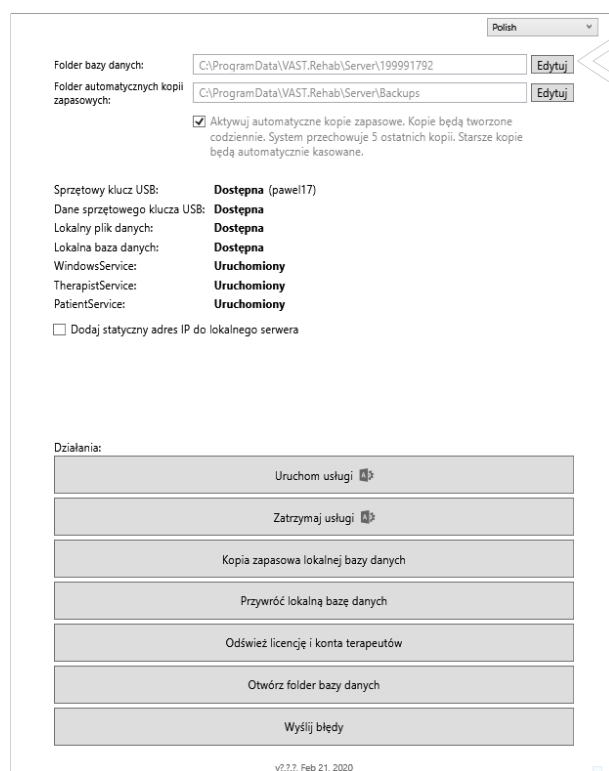

Polish

Folder bazy danych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\199991792 Edytuj

Folder automatycznych kopii zapasowych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups Edytuj

☒ Aktywuj automatyczne kopie zapasowe. Kopie będą tworzone codziennie. System przechowuje 5 ostatnich kopii. Starsze kopie będą automatycznie kasowane.

Sprzętowy klucz USB: Dostępna (pawel17)

Dane sprzętowego klucza USB: Dostępna

Lokalny plik danych: Dostępna

Lokalna baza danych: Dostępna

WindowsService: Uruchomiony

TherapistService: Uruchomiony

PatientService: Uruchomiony

☐ Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera

Działania:

- Uruchom usługi
- Zatrzymaj usługi
- Kopia zapasowa lokalnej bazy danych
- Przywróć lokalną bazę danych
- Odśwież licencję i konta terapeutów
- Otwórz folder bazy danych
- Wyślij błędy


v2.2.7, Feb 21, 2020

- 1 Wybierz dysk i folder, w którym chcesz przechowywać bazę danych

UTWÓRZ RĘCZNĄ KOPIĘ ZAPASOWĄ

SCENARIUSZE

Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej

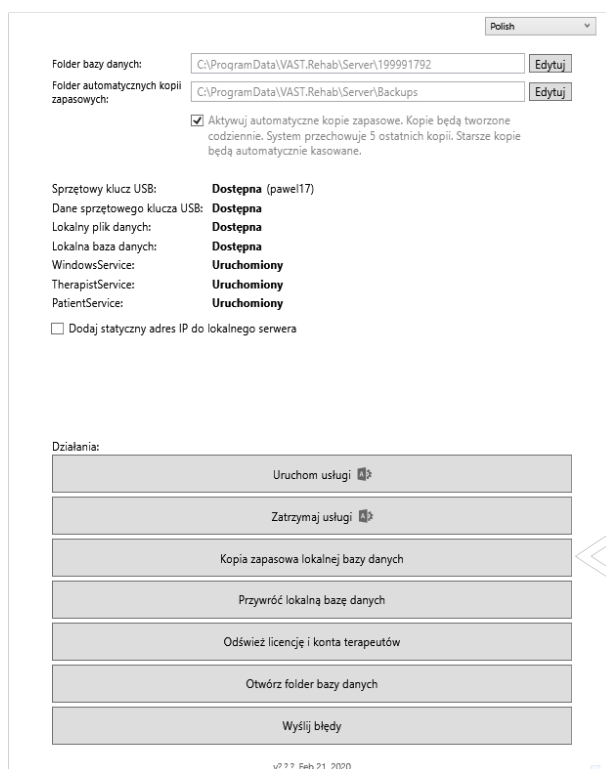

Folder bazy danych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\199991792 Edytuj

Folder automatycznych kopii zapasowych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups Edytuj

☒ Aktywuj automatyczne kopie zapasowe. Kopie będą tworzone codziennie. System przechowuje 5 ostatnich kopii. Starsze kopie będą automatycznie kasowane.

Sprzętowy klucz USB: **Dostępna** (pawel17)

Dane sprzętowego klucza USB: **Dostępna**

Lokalny plik danych: **Dostępna**

Lokalna baza danych: **Dostępna**

WindowsService: **Uruchomiony**

TherapistService: **Uruchomiony**

PatientService: **Uruchomiony**

☐ Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera

Działania:

- Uruchom usługi
- Zatrzymaj usługi
- Kopia zapasowa lokalnej bazy danych**
- Przywróć lokalną bazę danych
- Odśwież licencję i konta terapeutów
- Otwórz folder bazy danych
- Wyślij błędy


v2.7.7, Feb 21, 2020

1 Kliknij i wybierz lokalizację docelową

PRZYWRÓĆ BAZĘ DANYCH Z KOPII ZAPASOWEJ

SCENARIUSZE

Postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej

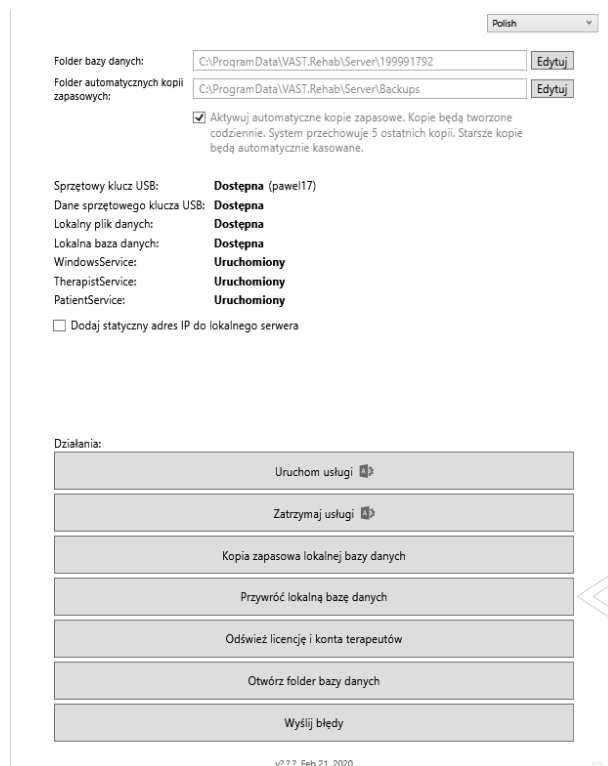

Polish

Folder bazy danych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\199991792 Edytuj

Folder automatycznych kopii zapasowych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups Edytuj

☒ Aktywuj automatyczne kopie zapasowe. Kopie będą tworzone codziennie. System przechowuje 5 ostatnich kopii. Starsze kopie będą automatycznie kasowane.

Sprzętowy klucz USB: **Dostępna (pawel17)**

Dane sprzętowego klucza USB: **Dostępna**

Lokalny plik danych: **Dostępna**

Lokalna baza danych: **Dostępna**

WindowsService: **Uruchomiony**

TherapistService: **Uruchomiony**

PatientService: **Uruchomiony**

☐ Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera

Działania:

- Uruchom usługi
- Zatrzymaj usługi
- Kopia zapasowa lokalnej bazy danych
- Przywróć lokalną bazę danych**
- Odśwież licencje i konta terapeutów
- Otwórz folder bazy danych
- Wyślij błędy


v2.3.2, Feb 21, 2020

- 1 Kliknij i wybierz plik kopii zapasowej, którego chcesz użyć do zastąpienia aktualnie używanej bazy danych

ODŚWIEŻ LICENCJE DOSTĘPNE NA SERWERZE LOKALNYM

SCENARIUSZE

Jeśli chcesz dodać więcej stacji pacjenta lub aktywować nowe moduły do istniejących stacji, skontaktuj się z dystrybutorem VAST.Rehab. Po sfinalizowaniu zamówienia musisz podłączyć komputer, na którym jest zainstalowany serwer lokalny, do Internetu. Gdy połączenie internetowe jest aktywne, postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

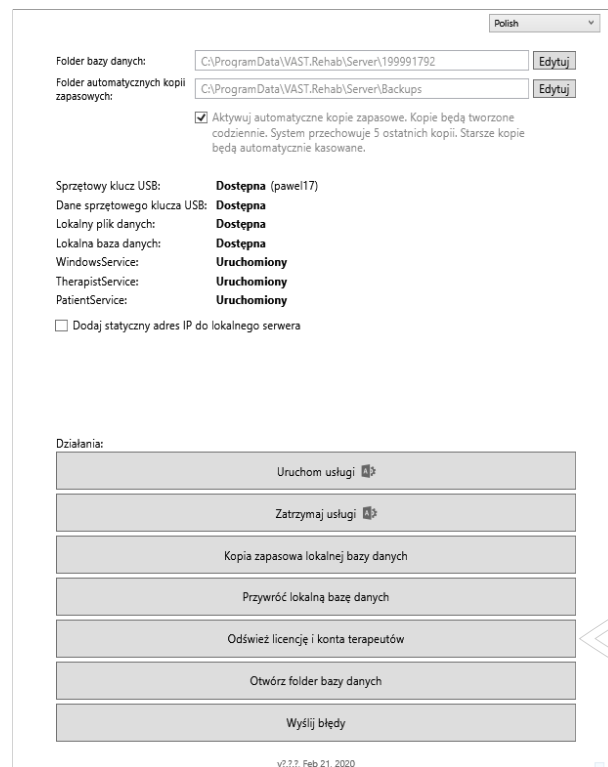

Polish

Folder bazy danych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\199991792 Edytuj

Folder automatycznych kopii zapasowych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups Edytuj

☒ Aktywuj automatyczne kopie zapasowe. Kopie będą tworzone codziennie. System przechowuje 5 ostatnich kopii. Starsze kopie będą automatycznie kasowane.

Sprzętowy klucz USB: **Dostępna** (pawel17)

Dane sprzętowego klucza USB: **Dostępna**

Lokalny plik danych: **Dostępna**

Lokalna baza danych: **Dostępna**

WindowsService: **Uruchomiony**

TherapistService: **Uruchomiony**

PatientService: **Uruchomiony**

☐ Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera

Działania:

- Uruchom usługi
- Zatrzymaj usługi
- Kopia zapasowa lokalnej bazy danych
- Przywróć lokalną bazę danych
- Odśwież licencje i konta terapeutów**
- Otwórz folder bazy danych
- Wyślij błędy


v2.2.7, Feb 21, 2020

1 Kliknij tę opcję

CO ZROBIĆ, GDY POJAWI SIĘ PROBLEM?

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli z jakiegoś powodu serwer lokalny zawiesza się, podłącz komputer do Internetu i postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej. System automatycznie prześle nam informacje zebrane po awarii aplikacji - pomogą nam one rozwiązać napotkany problem.

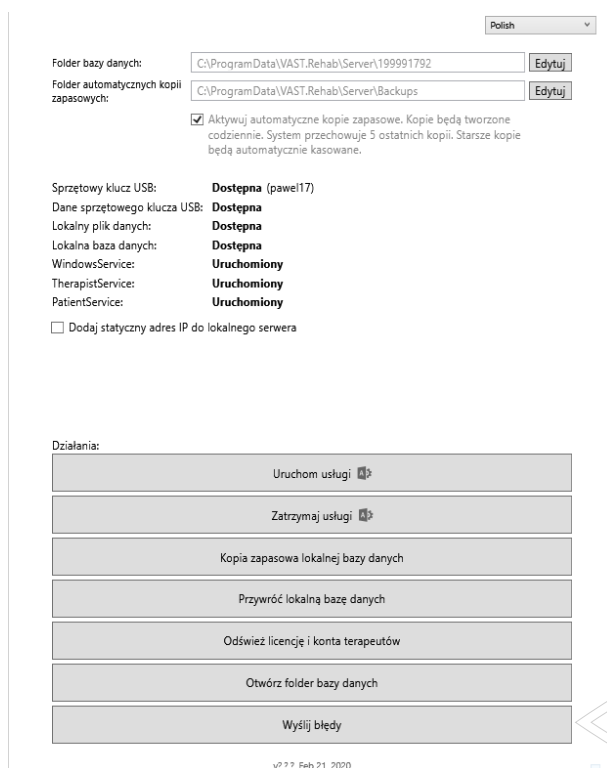

Folder bazy danych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\199991792 Edytuj

Folder automatycznych kopii zapasowych: C:\ProgramData\VAST.Rehab\Server\Backups Edytuj

☒ Aktywuj automatyczne kopie zapasowe. Kopie będą tworzone codziennie. System przechowuje 5 ostatnich kopii. Starsze kopie będą automatycznie kasowane.

Sprzętowy klucz USB: **Dostępna** (pawel17)

Dane sprzętowego klucza USB: **Dostępna**

Lokalny plik danych: **Dostępna**

Lokalna baza danych: **Dostępna**

WindowsService: **Uruchomiony**

TherapistService: **Uruchomiony**

PatientService: **Uruchomiony**

☐ Dodaj statyczny adres IP do lokalnego serwera

Działania:

- Uruchom usługi
- Zatrzymaj usługi
- Kopia zapasowa lokalnej bazy danych
- Przywróć lokalną bazę danych
- Odśwież licencje i konta terapeutów
- Otwórz folder bazy danych
- Wyślij błędy

v2.2.7, Feb 21, 2020

1 Kliknij tę opcję